



Diversey™

Oxivir Excel™ Wipe

Bruksfärdiga rengörings- och desinfektionsdukar med bredspektrum effekt, för icke invasiva medicinska instrument och för icke porösa hårda ytor.

Produktbeskrivning

Diversey Oxivir Excel™ Wipe CE är en bruksfärdig, kombinerad rengörings- och desinfektionsduk som har ett brett spektrum effekt mot sjukdomsalstrande bakterier och virus. Produktens sammansättning ger en kort kontakttid. Baserad på Diverseys patenterade Accelerated Hydrogen Peroxide (AHP) formulering kan Oxivir Excel™ Wipe CE användas på icke invasiva medicinska instrument och hårda, icke porösa ytor.

Produktegenskaper

- Bakterie-, virus- och jästdödande
- Desinficerande och effektiv mot alla virus på enbart 30 sekunder
- Säker för både användare och ytor
- Enkel att använda, ingen förberedelse eller tvätt nödvändig
- Effektiv rengöring
- Parfymfri
- Bryts aktivt ner till vatten och syre
- Ingen eftersköljning behövs

Produktfördelar

Produkten avdödar ett brett spektrum av virus och bakterier och ger den högsta möjliga säkerheten för kunder, patienter och personal. Oxivir Excel är testad enligt Europeiska normer och är effektiv mot ett flertal sjukdomsframkallande organismer inklusive *Poliovirus*, *Adenovirus* och *Murine norovirus*. Produkten är även testad effektiv mot alla höljeförsedda virus såsom: HIV, HBV, HVC, *Influenza*, *Vaccinia*- och *Coronavirus*.

- Kort kontakttid som säkerställer att ytan är fuktig under verkningsstiden
- Utmärkta rengöringsegenskaper och inte brandfarlig
- Säker att använda i närhet av patienter, personal och besökare. Inget behov av skyddsutrustning
- Skonsam mot ytmaterial och förlänger därmed materialets livstid
- Enkel och lättanvänd lösning som utesluter misstag med utspädning
- Ingen risk för korskontaminering, tack vare förpreparerade engångsdukar
- Utmärkt att använda på handkontaktytor under pågående smittspridning i en pandemi samt för alla högriskområden inom sjukvård och äldreomsorg

Bruksanvisning

Applikation

1. Avlägsna lös smuts.
2. Öppna förpackningen med dukar, dra ut en duk och stäng locket.
3. Torka av ytan och säkerställ att hela ytan är fuktad, låt ytan lufttorka.
4. Vid behov av längre kontaktider, säkerställ att ytan förblir fuktad under önskad kontaktid.
5. Tag en ny duk när den inte längre fuktat ytan, om duken är synbart smutsig eller när en ny patientnära yta ska rengöras och desinficeras.

Viktigt: Kombinera inte med andra produkter. Använd inte på ytor känsliga för syra.



CE 0044



© A.I.S.E.

Teknisk information

Utseende:	Duk av polypropylen
Relativ densitet [20° C]:	1.000
pH brukslösning:	1.95
Hållbarhet:	2 år i oöppnad behållare, 28 dagar efter öppning
Doft:	Neutral

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om användning och hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad. Förvaras i sluten originalförpackning. Undvik extrema temperaturer. Reagerar med oxiderbara ämnen.

Att beakta

Oxivir Excel™ CE Wipe är lämplig att använda på alla tänkbara ytor förutsatt att man följer rekommenderade anvisningar.

Miljöinformation

Tensiderna i produkten är lätt nedbrytbara enligt tvätt- och rengöringsmedelsförordningen, EC 648/2004

Mikrobiologisk information

Oxivir Excel™ CE är godkänd enligt: EN13727, EN13624, EN14476, EN16615, EN1276, EN1650

Krav	EN test	Kontaktid
<i>Bakterieavdödande</i>	EN13727	30 sek
	EN1276	1 min
	EN16615	1 min
<i>Fungicida-/ jästavdödande</i>	EN13624	5 min
	EN1650	5 min
	EN16615	1 min
<i>Virusavdödande</i>	EN14476	30 sek

Förpackningsstorlekar

Artikelnummer	Förpackningsstorlek	Dukstorlek	Förpackningstyp
101105022 Oxivir Excel™ Wipe CE	6x120 st dukar	152x177 mm	Burk
100984248 Oxivir Excel™ Wipe CE	12x100 st dukar	267x200 mm	Mjuk plastförpackning
100984050 Oxivir Excel™ Wipe CE	12x30 st dukar	267x200 mm	Mjuk plastförpackning