



Diversey™

Oxivir Excel™ Foam CE

Bruksfärdigt rengörings- och desinfektionsmedel i skumsprayflaska med breda spektrumeffekt, för icke invasiva medicinska instrument och för icke porösa hårda ytor.

Produktbeskrivning

Diversey Oxivir Excel™ Foam CE är ett bruksfärdigt rengörings- och desinfektionsmedel som har ett brett spektrum mot sjukdomsalstrande bakterier och virus. Produktens sammansättning ger en kort kontakttid. Baserad på Diverseys patenterade Accelerated Hydrogen Peroxide (AHP) formulering kan Oxivir Excel Foam användas på icke invasiva medicinska instrument, hårda, icke porösa ytor och vissa textila möbler.

Produktegenskaper

- Bakterie-, virus- och jästdödande
- Desinficerande och effektiv mot alla virus på enbart 30 sekunder
- Säker för både användare och ytor
- Effektiv rengöring
- Parfymfri
- Bryts aktivt ner till vatten och syre
- Ingen eftersköljning behövs

Produktfördelar

Produkten avdödar ett brett spektrum av virus och bakterier och ger den högsta möjliga säkerheten för kunder patienter och personal. Oxivir Excel är testad enligt Europeiska normer och är effektiv mot ett flertal sjukdomsframkallande organismer inklusive *Poliovirus*, *Adenovirus* och *Murin norovirus*. Produkten är även testad effektiv mot alla höljeförsedda virus såsom: HIV, HBV, HVC, *Influenta*, *Vaccinia*- och *Coronavirus*.

- Kort kontakttid som säkerställer att ytan är fuktig under verkningstiden.
Utmärkta rengöringsegenskaper och inte brandfarlig
Säker att använda i närheten av patienter, personal och besökare. Inget behov av skyddsutrustning
- ##### Ingen farlig miljöklassificering och innehåller inga irriterande ämnen vid inandning av produkten
Enkel och lättanvänd färdig brukslösning utesluter misstag vid spädning
- AHP formuleringen är skonsam mot ytmaterialet och förlänger därmed materialets livslängd
- Utmärkt att använda på handkontaktytor under pågående smittspridning i en pandemi samt för alla högriskområden inom sjukvård och äldreomsorg

Bruksanvisning

Applikation/produkt

Skumsprayrengöring och desinfektion:

1. Avlägsna lös smuts.
2. Spraya på torkduken och torka ytan eller spraya direkt på ytan som ska rengöras.
3. Säkerställ att ytan förblir fuktad under kontakttiden, låt ytan lufttorka.

Viktigt: Kombinera inte med andra produkter. Använd inte produkten på ytor känsliga för syra.



Teknisk information

Utseende:	Klar, färglös vätska
Relativ densitet [20° C]:	1.000
pH brukslösning:	1.95
Hållbarhet:	2 år i oöppnad behållare
Doft:	Neutral

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om användning och hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad. Förvaras i sluten originalförpackning. Undvik extrema temperaturer. Reagerar med oxiderbara ämnen.

Att beakta

Oxivir Excel™ Foam CE är lämplig att använda på alla tänkbara ytor förutsatt att man följer rekommenderade anvisningar.

Miljöinformation

Tensiderna i produkten är lätt nedbrytbara enligt tvätt- och rengöringsmedelsförordningen, EC 648/2004

Mikrobiologisk information

Oxivir Excel™ Foam CE är godkänd enligt: EN13727, EN13624, EN14476, EN16615, EN1276, EN1650, EN13704

Krav	EN test	Kontaktid
<i>Bakterieavdödande</i>	EN13727	30 sek
	EN13697	5 min
	EN16615	1 min
<i>Fungicida-/ jästavdödande</i>	EN13624	5 min
	EN13697	5 min
	EN16615	1 min
<i>Virusavdödande</i>	EN14476	30 sek

Förpackningsstorlekar

Artikelnummer
100941432 Oxivir Excel™ Foam CE

Förpackningsstorlek
6x750 ml

Förpackningstyp
Skumsprayflaska